

# ДРЕНАЖНАЯ ТРУБКА КЕРА

Предназначена для дренирования общего желчного протока

- изготовлена из высококачественного латекса
- устойчива к слипанию при обратных перегибах
- размеры 30x15 см и 40x20 см
- стерильная, в индивидуальной упаковке
- несмываемая маркировка на трубке
- стерилизация оксидом этилена

## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


- для одноразового использования
- не использовать при нарушении стерильной упаковки
- срок годности 5 лет с даты изготовления, указанной на упаковке
- хранить при температуре от -30 до +45°C
- обработка и утилизация изделия в установленном порядке

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

- в стерильных условиях вскрыть индивидуальную упаковку
- отмерить и отрезать необходимую длину трубки (при необходимости)
- установить дренаж в общий желчный проток в соответствии с правилами общехирургической практики
- зафиксировать дренаж по общепринятой методике
- подключить систему через коннектор к дренажному мешку
- провести дренирование в пределах необходимого объема и времени
- после окончания процедуры дренирования аккуратно удалить дренажную систему
- подлежит обработке и утилизации в установленном порядке

Размер по шкале Шарьера Ch/Fr	Внутренний диаметр I.D. (мм)	Внешний диаметр O.D. (мм)	Номер размера по Российской классификации
12	2,8	4,0	3
16	3,8	5,3	5
20	5,1	6,7	6
22	5,6	7,3	7
26	6,9	8,7	9
30	8,0	10,0	10
32	8,7	10,7	11

REF. Каталожный номер  
 MFD Дата производства  
 EXP Использовать до  
 LOT Номер партии

 Для одноразового использования

**STERILE EO**

Стерилизовано оксидом этилена

**NON TOXIC  
 PYROGEN FREE**

Не токсично  
 Апирогенно



Смотрите инструкцию

РУ ФС № 2006/1580 от 10.10.2006

Производитель: Чаншу Сенлин Медикал Эплайнс Ко., Лтд.  
 Адрес: КНР, Баймао Лиши, г. Чаншу, провинция Цзянсу 215532  
 по заказу «Алексмед Интернэшнл Б.В.»