

Spinex

APREXMED

ИГЛА СПИНАЛЬНАЯ ТИП КВИНКЕ

Предназначена для проведения спинальной (субарахноидальной) анестезии

- размеры G18, G19, G20, G22, G23, G25, G26, G27
- игла изготовлена из нержавеющей стали
- павильон иглы изготовлен из полипропилена
- мандрен-обтуратор, закодированный цветом (международный стандарт) для быстрого определения размера иглы
- размер мандрена-обтуратора точно соответствует внутреннему каналу иглы
- пластина-рукоятка для надежного введения иглы
- прозрачный павильон для быстрого обнаружения обратного течения ликвора
- стерилизована оксидом этилена
- длина иглы 90 мм

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- срок годности 5 лет с даты, указанной на упаковке
- не использовать при нарушении целостности стерильной упаковки
- соблюдать меры предосторожности при работе с изделием повышенной опасности (опасность травматизма)
- хранить при температуре от -30 до +50°C
- обработка и утилизация изделия в установленном порядке

1. Металлическая заостренная часть
2. Мандрен-обтуратор
3. Цветная головка обтуратора
4. Прозрачный павильон
5. Пластина-рукоятка



Размер, G	Внешний диаметр O.D (мм)	Цвет	Размер, G	Внешний диаметр O.D (мм)	Цвет
18	1.26	розовый	23	0.66	синий
19	1,06	кремовый	25	0.55	оранжевый
20	0,90	желтый	26	0.44	коричневый
22	0.70	черный	27	0.33	светло-серый

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

- подобрать соответствующий размер спинальной иглы
- провести антисептическую обработку зоны введения иглы
- произвести местную анестезию кожи и подлежащих тканей
- ввести спинальную иглу в спинальное пространство, испытывая сопротивление прокола твердой мозговой оболочки
- вынуть обтуратор из спинальной иглы и подождать пока не появится спинальная жидкость в прозрачном павильоне иглы

ВНИМАНИЕ! Если спинальная жидкость не вытекает, то следует ввести в спинальную иглу обтуратор, повернуть иглу на 90°, немного поменять глубину постановки иглы, вынуть обтуратор. Повторить манипуляцию пока не появится спинальная жидкость в подтверждении правильной установки иглы.

Не применять излишние усилия при введении иглы - возможна поломка иглы!

Согнутая спинальная игла к дальнейшему применению не пригодна и подлежит немедленной замене на новую иглу!

- ввести анестетик
- извлечь спинальную иглу
- закрыть место пункции стерильным материалом
- утилизация иглы в установленном порядке

ВНИМАНИЕ! Выпрямлять согнутую иглу категорически запрещено! При несоблюдении данных требований компания за последствия ответственности не несет.

ВАЖНО! Всегда вводить спинальную иглу вместе с обтуратором.

При ощущении сопротивления либо испытывания пациентом боли при введении анестетика процедуру следует немедленно приостановить и действовать в соответствии с медицинскими показаниями и методиками.

Не применять излишние усилия при введении иглы - возможна поломка иглы. При сгибании тела иглы не пытаться придать ей первоначальную форму, не разгибать ее, а немедленно вынуть и использовать новую спинальную иглу. При несоблюдении данных условий компания ответственности за последствия не несет.

REF.	Каталожный номер
MFD	Дата производства
EXP	Использовать до
LOT	Номер партии
PCS	Количество штук



Для одноразового применения

STERILE EO

Стерилизовано оксидом этилена

NON TOXIC

Не токсично

PYROGEN FREE

Апирогенно



Смотрите инструкцию

Организация, уполномоченная изготовителем на принятие и удовлетворение требований потребителей в отношении товаров ненадлежащего качества: ООО "МЕДИКОМ", 129301, Москва, ул. Касаткина, д. 3. Тел./факс: (495) 651-91-16



IM15

1023