

КАТЕТЕР МАЛЕКОТА

Предназначен для длительного (до 30 суток) стомирования мочевого пузыря и различных медицинских манипуляций через наложенную эпицистостому

- изготовлен из высококачественного латекса, покрытого силиконом
- общая длина катетера 400 мм
- закрытый конец, 3 боковых отверстия на головке-оливке
- стерилизован оксидом этилена

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- только для однократного применения
- не использовать при нарушении целостности стерильной упаковки
- срок годности 5 лет с даты изготовления, указанной на упаковке
- содержит латекс, который может вызывать аллергические реакции
- хранить при температуре от -30 до +45°C

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

- надеть перчатки
- наложить эпицистостому согласно общепринятым медицинским методикам
- при помощи проводника ввести катетер через эпицистостому в мочевой пузырь до появления мочи
- удалить проводник из катетера
- свободный конец опустить в ёмкость для сбора мочи или подсоединить к мочеприемнику
- подлежит обработке и утилизации в установленном порядке

ВНИМАНИЕ!

Для профилактики воспалительных изменений в мочевом пузыре один раз в 2 недели рекомендуется промывать катетер и мочевой пузырь раствором фурациллина. Смену катетера Малекота следует производить не реже 1 раза в месяц

Применять с осторожностью у лиц с повышенной чувствительностью к латексу

по шкале Шарьера Ch/Fr	внутренний диаметр I.D. (мм)	внешний диаметр O.D (мм)
18	4,5	6,0
20	5,1	6,7
22	5,6	7,3
24	6,2	8,0
26	6,9	8,7
28	7,5	9,3
30	8,0	10,0
32	8,7	10,7
34	9,3	11,3
36	10,0	12,0

ПУ № ФСЗ 2008/02211 от 18.07.2008



ИМ15

Производитель:

"Вэл Лид Медикал Инструментс Ко., Лтд.", Китай
 Well Lead Medical Instruments Co., Ltd., Guangzhou, Panyu,
 Hualong, Industrial distr. Jinhu C-4, P.R. China
 For "Apexmed International B.V.", the Netherlands

REF. — Каталогный номер
 MFD — Дата производства
 EXP — Использовать до
 LOT — Номер партии

STERILE EO

— Стерилизовано оксидом этилена

NON TOXIC — Не токсично
PYROGEN FREE — Апирогенно



— Для одноразового применения



— Смотрите инструкцию