

КАТЕТЕР НЕЛАТОНА

ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ КАТЕТЕРИЗАЦИИ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ

- изготовлен из прозрачного термопластичного имплантационно-нетоксичного поливинилхлорида
- длина 40±2 см, закрытый конец, 2 боковых отверстия
- стерилизован оксидом этилена
- 4 и 5 пальцами правой руки, смочить вводимый конец катетера в стерильном глицерине или стерильном вазелиновом масле
- обработать отверстие мочеиспускательного канала раствором фурациллина
- свободный конец опустить в емкость для сбора мочи или подсоединить к мочеприемнику
- соблюдая правила асептики, ввести катетер в отверстие мочеиспускательного канала до появления мочи
- закрепить катетер с помощью лейкопластыря или тесьмы
- по окончании выведения мочи катетер извлечь, нажав при этом на надлобковую область ладонью левой руки
- промокнуть отверстие уретры стерильным тампоном
- обработать и утилизировать катетер в установленном порядке
- срок годности 5 лет с даты изготовления, указанной на упаковке
- хранить при температуре от -30 до +45°C
- утилизация и обработка катетера согласно ОСТа 42-21-2-81

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- для однократного применения
- не использовать при нарушении целостности стерильной упаковки

ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- надеть перчатки
- взять стерильный катетер пинцетом в правую руку ближе к дистальному концу (4-5 см)
- свободный конец катетера захватить между

По шкале Шарьера Ch/Fr	Внутренний диаметр I.D (мм)	Внешний диаметр O.D (мм)	Цвет
6	1,1	2,0	бирюзовый
8	1,7	2,7	голубой
10	2,3	3,3	черный
12	2,8	4,0	белый
14	3,3	4,7	зеленый
16	3,8	5,3	оранжевый
18	4,5	6,0	красный
20	5,1	6,7	желтый

REF. Каталожный номер
 MFD Дата производства
 EXP Использовать до
 LOT Номер партии

STERILE EO

Стерилизовано оксидом этилена

NON TOXIC

Не токсично

PYROGEN FREE

Апирогенно

PHTHALATE FREE

Без фталатов



Для одноразового применения



Смотрите инструкцию

Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2008/02858 от 19.11.2008

Производитель: "Апексмед Интернэшнл Б.В."

Кейзерсграхт, 62-64, 1015 CS, Амстердам, Нидерланды



IM15

1023