

# ЛЕЗВИЯ ДЛЯ СКАЛЬПЕЛЯ ОДНОРАЗОВЫЕ

из высокоуглеродистой стали

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ









- изготовлены из высокоуглеродистой стали
- размеры №№ 10, 11, 12, 13, 15, 15C, 18, 20, 21, 22, 23, 24
- стерилизованы гамма-излучением
- лезвия индивидуально упакованы в фольгу, ориентированы в одну сторону и уложены в транспортную тару

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- для одноразового использования
- не использовать при нарушении целостности стерильной упаковки
- соблюдать меры предосторожности при работе с изделием повышенной опасности (вероятность травматизма)!
- срок годности 5 лет с даты изготовления
- хранить при температуре от -30 до +50°C
- утилизация и обработка лезвий в установленном порядке

### ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

- вскрыть коробку и достать лезвие в индивидуальной упаковке
- вскрыть индивидуальную упаковку и извлечь лезвие, соблюдая правила асептики
- присоединить стерильное лезвие к стерильной ручке через специальные отверстия-крепления на лезвии
- по окончании работы скальпелем снять лезвие с ручки в обратном порядке, соблюдая меры предосторожности
- после использования лезвия подлежат утилизации в установленном порядке

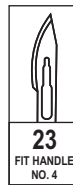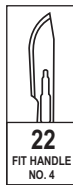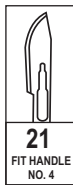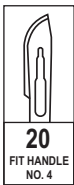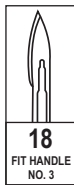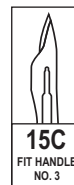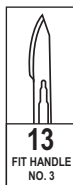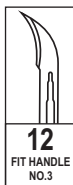

REF. Каталожный номер  
MFD Дата производства  
EXP Использовать до  
LOT Номер партии



Для одноразового использования

**STERILE | R**

Стерилизовано  
гамма излучением

**NON TOXIC**

Не токсично

**PYROGEN FREE**

Апирогенно



Смотрите  
инструкцию

Производитель:  
"Апексмед Интернэшнл Б.В."  
Кейзерсграхт, 62-64, 1015 CS,  
Амстердам, Нидерланды  
Apexmed International B.V.



IM15 1023

Рег. уд. № ФСЗ 2008/02861  
от 19.11.2008

# ЛЕЗВИЯ ДЛЯ СКАЛЬПЕЛЯ ОДНОРАЗОВЫЕ из нержавеющей стали

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ










- изготовлены из нержавеющей стали
- размеры №№ 10, 11, 12, 13, 15, 15C, 18, 20, 21, 22, 23, 24
- стерилизованы гамма-излучением
- лезвия индивидуально упакованы в фольгу, ориентированы в одну сторону и уложены в транспортную тару

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- для одноразового использования
- не использовать при нарушении целостности стерильной упаковки
- соблюдать меры предосторожности при работе с изделием повышенной опасности (вероятность травматизма)!
- срок годности 5 лет с даты изготовления
- хранить при температуре от -30 до +50°С
- утилизация и обработка лезвий в установленном порядке

### ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

- вскрыть коробку и достать лезвие в индивидуальной упаковке
- вскрыть индивидуальную упаковку и извлечь лезвие, соблюдая правила асептики
- присоединить стерильное лезвие к стерильной ручке через специальные отверстия-крепления на лезвии
- по окончании работы скальпелем снять лезвие с ручки в обратном порядке, соблюдая меры предосторожности
- после использования лезвия подлежат утилизации в установленном порядке

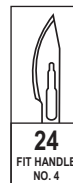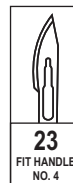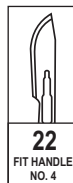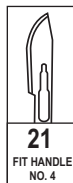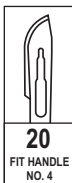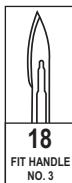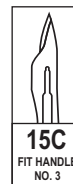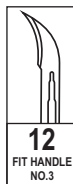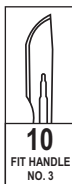

REF. Каталожный номер  
MFD Дата производства  
EXP Использовать до  
LOT Номер партии



Для одноразового  
использования

**STERILE R**

**NON TOXIC**

**PYROGEN FREE**



Стерилизовано  
гамма излучением

Не токсично

Апирогенно

Смотрите  
инструкцию

Производитель:  
"Апексмед Интернэшнл Б.В."  
Кейзерсграхт, 62-64, 1015 CS,  
Амстердам, Нидерланды  
Apexmed International B.V.



IM15 1023

Reg. уд. № ФСЗ 2008/02861  
от 19.11.2008