

ЛОЖКА ФОЛЬКМАНА

Применяется при взятии материала
с поверхности слизистой влагалища, шейки матки
и уретры для бактериологических исследований

- изготовлена из медицинского ПВХ
- общая длина 210 мм
- стерилизована оксидом этилена

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- предназначен для одноразового использования
- не использовать при нарушении целостности стерильной упаковки
- срок годности 5 лет с даты указанной на упаковке
- хранить при температуре от -30 до +45 °C
- обработка утилизация в установленном порядке

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

- в стерильных условиях вскрыть индивидуальную упаковку
- удерживая инструмент за ручку расположенную в центральной части, одной из рабочих концов проводить легкие скользящие движения по поверхности слизистой
- перенести соскобленный материал на обезжиренное предметное стекло
- мазки зафиксировать путем высушивания на воздухе

REF. Каталожный номер

MFD Дата производства

EXP Использовать до

LOT Номер партии



Смотрите инструкцию

STERILE EO

NON TOXIC

PYROGEN FREE



Стерилизовано
оксидом этилена

Не токсично

Апирогенно

Не использовать
при поврежденной
упаковке

Производитель:
"Апексмед Интернэшнл Б.В."
Кейзерсграхт, 62-64, 1015 CS,
Амстердам, Нидерланды

РУ №: ФСЗ 2010/06519 от 31.03.10



ИМ15



1023