

Venoflex

UNO DUO TRIO

НАБОР ДЛЯ КАТЕТЕРИЗАЦИИ ЦЕНТРАЛЬНЫХ ВЕН

Методика Сельдингера

1. Перед использованием набора проверьте целостность упаковки. В случае нарушения целостности упаковки использовать набор нельзя.
2. Для катетеризации подключичной или яремной вены положите пациента на спину с опущенным головным концом, для того чтобы избежать воздушной эмболии.
3. Место венопункции обработайте антисептиком и обложите стерильным материалом.
4. Вскройте упаковку, проверьте комплектацию и исправность всех компонентов набора.
5. Кожу и область введения катетера инфильтруйте раствором местного анестетика. Пункция вены производится с помощью пункционной иглы с присоединенным шприцом. При правильном положении иглы в вене шприц свободно поступает кровь.
6. Отсоедините шприц от иглы.
7. Снимите крышку с пластикового направителя J-образного проводника, вставьте в канюлю иглы и большим пальцем аккуратно продвигайте J-образный проводник через иглу в сосуд на необходимую глубину. Если чувствуется какое-либо сопротивление при продвижении J-образного проводника, извлеките одновременно иглу и направитель.
8. Осторожно удалите пластиковый направитель J-образного проводника из канюли иглы.
9. Удерживая J-образный проводник на месте, извлеките иглу.
10. Расширьте область входа в сосуд, вводя дилатационный буж (расширитель) по J-образному проводнику, не извлекая его.

ВНИМАНИЕ! При введении катетера или расширителя через J-образный проводник, убедитесь, что выступающая длина J-образного проводника достаточна, чтобы удерживать его на протяжении всей манипуляции. Дилатационный буж (расширитель) нельзя оставлять в сосуде как постоянный катетер, поскольку это может привести к повреждению сосуда.

11. После извлечения расширителя, по проводнику введите дистальный конец катетера Venoflex на необходимую глубину. Градуировка на трубке катетера (каждые 10 мм, начиная с 5 см от дистального конца) облегчает введение катетера на необходимую длину.
12. Удерживая катетер на необходимой глубине, осторожно удалите J-образный проводник. Присоедините шприц к канюле основного катетера и втяните, чтобы убедиться по обратному току крови в правильном расположении катетера.
13. Закрепите катетер на пациенте, используя специальные устройства для фиксации.
14. Наложите асептическую повязку на место пункции.
15. Регулярно проверяйте катетер и перевязанный участок, чтобы убедиться в том, что не произошло смещения катетера, сбоя в подаче растворов, утечки, что все соединения в порядке и нет признаков инфекции.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Данное изделие должно использоваться только квалифицированными специалистами. Перед использованием внимательно изучите инструкцию.

Проверьте расположение кончика катетера при помощи рентгена; если положение кончика не определится, введите контрастное вещество или выполните внутриартериальную электрокардиограмму.

Убедитесь в надежности соединений катетера, поскольку существует опасность возникновения аэроземболии.

Изделие должно применяться в соответствии с инструкцией по использованию.

КОМПАНИЯ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ, В РЕЗУЛЬТАТЕ НЕНАДЛЕЖАЩЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ.

Изделие не должно подвергаться переработке. Визуально осмотрите и тщательно проверьте изделие и упаковку перед применением. Неправильная транспортировка и некорректное обращение могут привести к структурным и/или функциональным повреждениям изделия или упаковки.

Изделие является нетоксичным, стерильным и апиrogenным, если целостность упаковки не была нарушена.

Только для одноразового использования. После применения утилизировать в установленном порядке.

Хранить в сухом прохладном месте.

Не подвергать воздействию тепла и прямых солнечных лучей.

Использовать сразу после вскрытия упаковки.

Не рекомендуется использовать данные катетеры более 30 дней.

REF.:	Каталожный номер
MFD:	Дата производства
EXP:	Использовать до
LOT:	Номер партии



Для одноразового применения

STERILE EO

Стерилизовано оксидом этилена



Смотрите инструкцию



Не содержит латекса

