

ЩЕТКА ЦЕРВЕКС-БРАШ

Предназначена для взятия соскоба с поверхности шейки матки и цервикального канала (экто- и эндоцервикса) с целью цитологических исследований


- изготовлен из медицинского ПВХ
- размер изделия: общая длина 200 мм; длина пластиковой ручки 165 мм
- стерилизована оксидом этилена

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- предназначен для одноразового использования
- не использовать при нарушении целостности стерильной упаковки
- срок годности 5 лет с даты указанной на упаковке
- хранить при температуре от -30 до +45 °С
- обработка и утилизация в установленном порядке

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

- в стерильных условиях вскрыть индивидуальную упаковку
- часть щетки с более длинными ворсинками вставить в наружный зев цервикального канала, другие более короткие прилегают к поверхности шейки матки
- щеткой сделать полный оборот при легком надавливании, в результате чего получается соскоб. Гибкость ворсинок щеточки позволяет легко собрать клетки со всей поверхности шейки матки и предотвращает повреждение тканей
- щеткой с полученным материалом сделать тонкие мазки на обезжиренном стекле
- мазки зафиксировать путем высушивания на воздухе

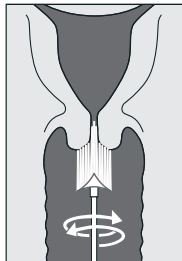

REF. Каталогный номер

MFD Дата производства

EXP Использовать до

LOT Номер партии



Смотрите инструкцию

STERILE EO

Стерилизовано оксидом этилена

NON TOXIC

Не токсично

PYROGEN FREE

Апирогенно



Не использовать при поврежденной упаковке

Производитель:

"Апексмед Интернэшнл Б.В."
 Кейзерсграхт, 62-64, 1015 CS,
 Амстердам, Нидерланды

РУ №: ФСЗ 2010/06519 от 31.03.10



ИМ15

1023