

ЩЕТКА ЦЕРВИКАЛЬНАЯ

Предназначена для взятия биологического материала с поверхности шейки матки и из цервикального канала для цитологических и бактериологических исследований

- изготовлен из медицинского ПВХ
- размер изделия: общая длина 195 мм, длина пластиковой ручки 175 мм, длина щетки 20 мм, диаметр пластиковой ручки 2 мм
- стерилизована оксидом этилена

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- предназначен для одноразового использования
- не использовать при нарушении целостности стерильной упаковки
- срок годности 5 лет с даты указанной на упаковке
- хранить при температуре от -30 до +45 °С
- обработка и утилизация в установленном порядке

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

- в стерильных условиях вскрыть индивидуальную упаковку
- ввести цитощетку в цервикальный канал (при заборе материала с поверхности шейки матки согнуть рабочую часть инструмента)
- щеткой сделать полный оборот, в результате чего получается соскоб. Гибкость ворсинок щеточки позволяет легко собрать клетки со всей поверхности шейки матки и предотвращает повреждение тканей
- щеткой с полученным материалом сделать мазки на обезжиренном стекле
- мазки зафиксировать путем высушивания на воздухе

REF. Каталожный номер

MFD Дата производства

EXP Использовать до

LOT Номер партии



Смотрите инструкцию

STERILE EO

Стерилизовано оксидом этилена

NON TOXIC

Не токсично

PYROGEN FREE

Апирогенно



Не использовать при поврежденной упаковке

Производитель:

"Апексмед Интернэшнл Б.В."
Кейзерсграхт, 62-64, 1015 CS,
Амстердам, Нидерланды

РУ №: ФСЗ 2010/06519 от 31.03.10



ИМ15



1023