

# **СКАЛЬПЕЛЬ ХИРУРГИЧЕСКИЙ С ПЛАСТМАССОВОЙ РУЧКОЙ**

**Предназначен для всех видов хирургических  
вмешательств**










- применяемые материалы:
  - ручка - полистирол
  - лезвие - нержавеющая сталь
- скальпели индивидуально упакованы в фольгу, ориентированы в одну сторону и уложены в транспортную тару
- стерилизован гамма-излучением

## **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

- срок годности 5 лет с даты стерилизации, указанной на упаковке
- не использовать при нарушении целостности стерильной упаковки
- соблюдать меры предосторожности при работе с изделием повышенной опасности (опасность травматизма)
- хранить при температуре от -30 до +45°C
- утилизация и обработка скальпеля в установленном порядке

## **ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ**

- вскрыть упаковку в стерильных условиях
- снять предохранительный пластиковый чехол с лезвия скальпеля
- по окончании работы вновь надеть пластиковый чехол на лезвие скальпеля
- утилизировать в установленном порядке

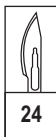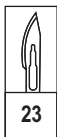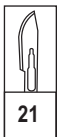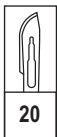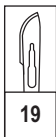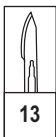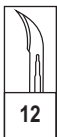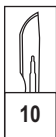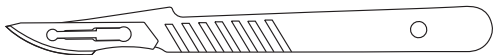

REF. Каталожный номер

MFD Дата производства

EXP Использовать до

LOT Номер партии



Смотрите инструкцию

**STERILE EO**

**NON TOXIC**

**PYROGEN FREE**



Стерилизовано  
оксидом этилена

Не токсично

Апирогенно

Для одноразового  
использования

«АПЕКСМЕД ИНТЕРНЭШНЛ Б.В.»  
Кейзерсграхт 62-64, 1015 CS,  
Амстердам, Нидерланды

РУ № ФСЗ 2008/02861 от 19.11.2008



IM15



1023