

ТРУБКА ЭНДОТРАХЕАЛЬНАЯ С МАНЖЕТОЙ / БЕЗ МАНЖЕТЫ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ

Предназначена для поддержания свободной проходимости дыхательных путей при оротрахеальной и/или назотрахеальной интубации, требующих специального направления проксимального конца трубки

- изготовлена из прозрачного имплантационно-нетоксичного поливинилхлорида с рентгенконтрастной линией
- наконечник трубки закругленной формы с окошком Мерфи
- просвет трубки стоек к слипанию при обратных перегибах
- манжета большого объема низкого давления (32 см. водного столба)
- коннектор с ушками для фиксации
- стерилизация оксидом этилена

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- для одноразового использования
- не использовать при нарушении целостности стерильной упаковки
- срок годности 5 лет с даты изготовления, указанной на упаковке
- хранить при температуре от -30 до +45°C
- обработка и утилизация изделия в установленном порядке

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ


- проверить целостность стерильной индивидуальной упаковки
- перед введением эндотрахеальной трубки проверить, чтобы манжета находилась в нераздутном состоянии
- проверить надежность фиксации коннектора к трубке
- эндотрахеальную трубку проводят через раскрытую голосовую щель с помощью ларингоскопа или фибробронхоскопа в трахею
- манжетка должна располагаться в верхних отделах трахеи
- раздуть воздухом манжету с помощью шприца через пилотный баллон
- закрепить эндотрахеальную трубку в нужном положении (специальный набор для фиксации эндотрахеальной трубки)
- по окончании интубации с помощью шприца из манжеты через пилотный баллон убрать воздух и извлечь трубку

Таблица соответствия размеров

Шарьера Ch/Fr	Внешний диаметр O.D. (мм)	Внутр. диаметр I.D.	Длина, мм
без манжеты			
8	2,9	2,0	140
10	3,5	2,5	145
12	4,2	3,0	165
14	4,9	3,5	185
16	5,5	4,0	210
18	6,2	4,5	225
с манжетой			
12	4,2	3,0	165
14	4,9	3,5	185
16	5,5	4,0	210
18	6,2	4,5	225
20	6,9	5,0	245
22	7,5	5,5	275
24	8,2	6,0	285
26	8,7	6,5	295
28	9,3	7,0	310
30	10,0	7,5	315
32	10,7	8,0	330
34	11,3	8,5	330
36	12,0	9,0	330
38	12,7	9,5	330
40	10,0	13,3	330

ВНИМАНИЕ!

Напряжение пилотного баллона не является критерием наполнения манжеты необходимым объемом воздуха. Положение эндотрахеальной трубки в трахее контролируется при аускультации легких (дыхательные шумы выслушиваются в легких).

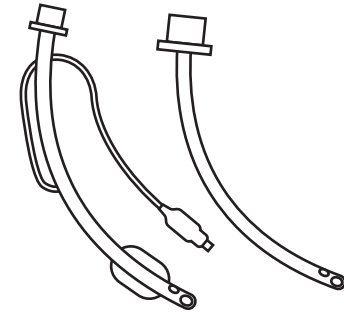

REF. Каталожный номер
MFD Дата производства
EXP Использовать до
LOT Номер партии



Для одноразового использования

STERILE EO

Стерилизовано оксидом этилена

NON TOXIC

Не токсично

PYROGEN FREE

Апирогенно

PHTHALATE FREE

Без фталатов



Смотрите инструкцию

Регистрационное удостоверение
№ ФСЗ 2008/02861 от 19.11.2008

Производитель:
"Алексмед Интернешнл Б.В."
Кейзерсграхт, 62-64, 1015 CS,
Амстердам, Нидерланды

