

ТРУБКА ТРАХЕОСТОМИЧЕСКАЯ С МАНЖЕТОЙ • БЕЗ МАНЖЕТЫ

Предназначена для проведения искусственной и вспомогательной вентиляции легких, самостоятельного дыхания через трахеостому, для проведения ингаляционного наркоза

- изготовлена из термопластичного имплантационно-нетоксичного поливинилхлорида с рентгенконтрастной линией
- имеет анатомический изгиб
- размеры без манжеты по ID 3.0 - 4.5, с манжетой по ID 5.0 - 9.0
- размеры трахеостомической трубки соответствуют внутреннему диаметру (по Международному стандарту)
- имеет стилет и гибкий фланец с шейной лентой для крепления на шею пациента
- несмываемая маркировка на трубке и пилотном баллоне
- стерилизация оксидом этилена
- перед введением трахеостомической трубки проверить, чтобы манжета находилась в нераздутном состоянии
- проверить надежность фиксации стилета и коннектора в трубке
- трахеостомическая трубка вводится через трахеостомическое отверстие, расположенное по общепринятым медицинским методам при помощи стилета с учетом анатомического изгиба
- извлечь стилет
- раздуть воздухом манжету с помощью шприца через пилотный баллон
- закрепить трахеостомическую трубку в нужном положении, используя гибкий фланец коннектора и ленты для фиксации
- по окончании интубации с помощью шприца из манжеты через пилотный баллон убрать воздух и вынуть трубку

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- для одноразового использования
- не использовать при нарушении целостности стерильной упаковки
- срок годности 5 лет с даты изготовления, указанной на упаковке
- хранить при температуре от -30 до +45°C
- обработка и утилизация трахеостомической трубки в установленном порядке

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

- проверить целостность стерильной индивидуальной упаковки

ВНИМАНИЕ! Напряжение пилотного баллона не является критерием наполнения манжеты необходимым объемом воздуха. Положение трахеостомической трубки в трахее контролируется при аускультации легких (дыхательные шумы выслушиваются в легких)

Размер ID	Трахеостомическая трубка Объем манжеты (мл)	Размер ID	Трахеостомическая трубка Объем манжеты (мл)
3.0	/	7.0	5.5
3.5	/	7.5	5.0
4.0	/	8.0	6.5
4.5	/	8.5	6.0
5.0	3.5	9.0	5.5
5.5	3.0		
6.0	4.5		
6.5	4.0		

ТАБЛИЦА СООТВЕТСТВИЯ РАЗМЕРОВ

Шарьера Fr/Ch	Внутренний диаметр I.D. (мм)	Внешний диаметр O.D. (мм)	Длина (мм)
без манжеты			
12	3.0	4.0	30
14	3.5	4.7	40
16	4.0	5.3	40
18	4.5	6.0	40
с манжетой			
20	5.0	6.7	55
22	5.5	7.3	55
24	6.0	8.0	60
26	6.5	8.7	70
28	7.0	9.3	75
30	7.5	10.0	80
32	8.0	10.7	85
34	8.5	11.3	90
36	9.0	12.0	90

REF.	Каталожный номер
MFD	Дата производства
EXP	Использовать до
LOT	Номер партии



Для одноразового использования

STERILE EO

Стерилизовано оксидом этилена

NON TOXIC

Не токсично

PYROGEN FREE

Апирогенно



Смотрите инструкцию



ИМ15



1023

PV № ФСЗ 2008/02861 от 19.11.2008

Производитель:
"Апексмед Интернэшнл Б.В."
Кейзерсграхт, 62-64, 1015 CS,
Амстердам, Нидерланды