

# ЗЕРКАЛО ВАГИНАЛЬНОЕ КУСКО С ПОВОРОТНЫМ ФИКСАТОРОМ

Применяется в акушерско-гинекологической практике  
для проведения профилактических гинекологических осмотров

- представляет собой двухстворчатое влагиальное зеркало в форме «утиного клюва»
- изготовлено из прочного теплопроводного атравматичного прозрачного стирола
- поворотный механизм замка позволяет работать одной рукой
- стерилизовано оксидом этилена

## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- для одноразового использования
- не использовать при нарушении целостности стерильной упаковки
- срок годности 5 лет с даты изготовления, указанной на упаковке
- хранить при температуре от -30 до +45°C
- обработка и утилизация изделия в установленном порядке

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

- проверить целостность стерильной упаковки
- вскрыть упаковку с зеркалом Куско, соблюдая правила асептики
- створки перед введением зеркала должны находиться в сомкнутом положении
- после введения развести створки ручками зеркала
- зафиксировать створки с помощью поворотного фиксатора
- по окончании манипуляции створки зеркала вновь привести в сомкнутое положение и извлечь зеркало

A - створки

B - ручки

C - поворотный механизм для фиксации

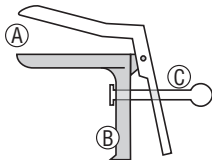


Таблица размеров

Размер	Цвет поворотного фиксатора
XS	белый
S	синий
M	красный
L	зеленый

REF.

Каталожный номер

MFD

Дата производства

EXP

Использовать до

LOT

Номер партии



Для одноразового использования

**STERILE EO**

Стерилизовано оксидом этилена

**NON TOXIC**

Не токсично

**PYROGEN FREE**

Апирогенно



Смотрите инструкцию



Поворотный фиксатор

Рег. уд. № ФСЗ 2008/02864 от 20.11.2009

Производитель: "Апексмед Интернэшнл Б.В."  
Кейзерсграхт, 62-64, 1015 CS, Амстердам,  
Нидерланды